

逐次型空気圧式マッサージ器

# DVTメドマー

## DVT-2B



# 医療現場で使う機器だから

医療従事スタッフにとって大切なこと  
使いやすさと負担の軽減、そして患者様の安らぎ  
これらをお届けすることを最優先に考えました。  
DVT-2Bは、皆様の想いにお応えします。



安らぎ

## 静音設計

患者様の安らぎを妨げない静音設計  
夜間病棟内と同等レベルの静音化を  
実現しました。

使いやすさ

## ワンタッチ操作

誤設定を防ぐ簡単ワンタッチ操作  
ON/OFFだけの簡単操作、カフも自動判別します。



バッテリー残量ランプ

足裏カフ  
確定ボタン

開始/停止ボタン

負担軽減

## シンプルデザイン

凹凸を極力抑えたシンプル・フラットデザインを採用  
日々、現場でかかせない消毒・除菌が容易で安心して  
お使いいただけます。



## 低ランニングコストのディスポーザブルカフ

下腿用と足裏用の2種類で、加圧部位を選択できます



下腿カフ



足裏カフ

Point  
1

素材と構造の工夫によりコストを抑制  
ディスポーザブルカフで重要なランニング  
コストを抑えます。

Point  
2

カフエアバッグは膨らみ幅80mmを確保  
患者様ごと異なる体形にもフィットし  
加圧力をしっかり伝えます。

### 使用例



下腿カフのみ



足裏カフのみ



下腿・足裏カフ組み合わせ

## 安心の本体5年保証

保証登録により本体はメーカー  
5年保証させていただきます。



5年保証

保証登録はこちら▶

保証対象は本体のみです  
詳細は裏面をご参照ください



## より良いDVT予防は、日々の使いやすさから



### ロング電源コード

長さ4mの電源コードを採用  
壁側コンセントまで、延長コード  
なしで接続可能です。



### 簡単設置

さまざまなフットボードに対応する本体フック  
差し込むだけで設置完了です。



### バッテリー駆動

患者様の移動時など、  
電源接続できない場面  
でもバッテリー駆動で  
運転停止しません。



### 簡単接続

ホースは簡単・確実に接続、  
不意な抜けも防止します。



### イージーメンテナンス

補修部品は、バッテリーカバーを開ける  
だけで簡単に交換ができます。



### お知らせメロディ

動作や警告にメロディを  
採用。小音量でも聴こえ  
やすく、大音量の不快感  
がありません。


逐次型空気圧式マッサージ器

# DVTメドマー

## DVT-2B

医療機器認証番号:302AHBZX00006000  
 類別:機械器具12 理学診療用器具  
 (JMDNコード16837000)

一般的名称:逐次型空気圧式マッサージ器  
 クラス分類:Ⅱ(管理医療機器)  
 特定保守:該当

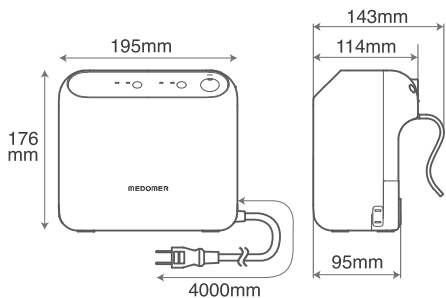


### 仕様:本体

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 電源                        | AC100V 50/60Hz  |
| 皮相電力                      | 38VA  |
| 電源コード                     | 長さ:4m   |
| エアース                      | 長さ:2m   |
| バッテリー                     | ニッケル水素電池 9.6V 1,800mAh                                |
| 充電による最大駆動時間 <sup>※1</sup> | 約11時間(下腿カフ使用時)<br>約4時間(足裏カフ使用時)<br>約7時間(下腿カフ・足裏カフ併用時) |
| 充電時間 <sup>※1</sup>        | 約13.5時間(本体運転状態)<br>約2.5時間(本体停止状態)                     |
| 設定圧力                      | 6.0kPa【45mmHg】(下腿カフ使用時)<br>17.3kPa【130mmHg】(足裏カフ使用時)  |


|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 加圧時間              | 15秒加圧(下腿カフ使用時)      |
|                   | 9秒加圧(足裏カフ使用時)       |
| 加圧休止時間            | 45秒加圧休止(下腿カフ使用時)    |
|                   | 21秒加圧休止(足裏カフ使用時)    |
| 作動音 <sup>※2</sup> | 30dB(排気音・電磁弁音除く)    |
| 定格時間              | 連続                  |
| 電撃に対する保護          | 内部電源機器/クラスⅡ         |
|                   | 程度:B形装着部(下腿カフ・足裏カフ) |
| 質量                | 本体:2.3kg            |
|                   | ホース:0.1kg/本(×2本)    |

※1:参考値です。環境条件により異なります。  
 ※2:当社測定条件による値です。環境条件により異なります。

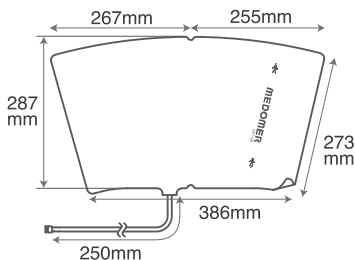

### 仕様:下腿カフ(型式:LS-2B)

|      |                |
|------|----------------|
| カフ丈  | 287mm          |
| 最大周長 | 410mm(ふくらはぎ周長) |
| 表面素材 | 不織布            |
| 質量   | 0.07kg/本       |
| 梱包数  | 10本入り          |

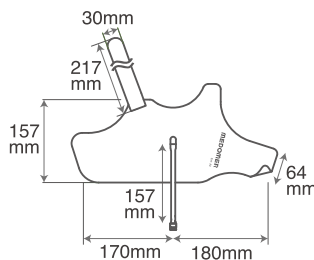

### 仕様:足裏カフ(型式:FS-2B)

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| カフ丈  | 157mm                       |
| 最大周長 | 305mm(足首周長)<br>305mm(足の甲周長) |
| 表面素材 | 不織布                         |
| 質量   | 0.05kg/本                    |
| 梱包数  | 10本入り                       |

## DVT-2B 本体セット

### セット内容

- ・本体
- ・ホース×2本

※本体セットにカフは付属しません



180,000円  
(税込価格198,000円)

## DVT-2B

### ディスポーザブルカフ(10本入り)



下腿カフ  
【LS-2B】  
25,000円(税込価格27,500円)



足裏カフ  
【FS-2B】  
30,000円(税込価格33,000円)

※価格は、メーカー希望小売価格です

## 補修部品



電源コード  
【CAB-400】  
5,000円  
(税込価格5,500円)



フック  
【BH-2B】  
4,000円  
(税込価格4,400円)



バッテリー  
【BP-2B】  
17,000円  
(税込価格18,700円)



エアース  
【H-2B】  
8,000円  
(税込価格8,800円)

## 警告

### 【使用方法】

- 下腿カフを使用の際(初期セットしたとき、又は再セットしたとき)には使用前点検として、下肢の末梢から中枢に向かって順番に加圧・除圧されることを確認すること。[この順序が間違っていると本品の長時間使用により、区画症候群等の合併症を起こす恐れがある。]
- 必ず市販のストッキングを装着のうえ、使用すること。[カフが直接皮膚に触れる状態で使用すると接触性皮膚炎等を起こす恐れがある。]
- 使用中、腓骨頭部分に圧迫物がないことを確認すること。[硬いものもろろんのこと、枕等の軟らかい圧迫物であっても、長時間圧迫が加わり続けると、圧迫の強弱にかかわらず総腓骨神経麻痺等を起こす恐れがある。]

## 禁忌・禁止 カフは再使用禁止

### 【適用対象(患者)】

- 広範囲な下肢の浮腫又は鬱血性心不全による肺浮腫が見られる患者。[症状を悪化させる恐れがある。]
- 重症な動脈硬化症又は虚血性疾患の患者。[症状を悪化させる恐れがある。]
- 極度の下肢変形がみられる患者。[本品が有する機能や性能が得られない可能性がある。]
- カフで圧迫する下肢部分に蜂窩織炎、静脈炎、壊疽、火傷、皮膚炎を有する患者及び静脈結紮(手術直後)又は最近植皮を行った患者。[皮膚に障害を与える恐れがある。]
- 深部静脈血栓症、肺塞栓症又はそれらの疑いがある患者。[深部静脈血栓症、肺塞栓症を引き起こしたり、症状を悪化させる恐れがある。]
- 心臓への血流の増加が悪影響を及ぼす可能性がある患者。[症状を悪化させる恐れがある。]
- 感染症及び下肢の感覚のない患者。[症状を悪化させる恐れがある。]

### 〈保証期間〉

お買い上げ日より5年間

※Web保証登録をお願いいたします。ご登録いただくと、保証が受けられない場合がございます。  
 ※保証対象は本体のみとなります。〔「正常な使用状態」で万一故障が起きた場合に限り。〕  
 ※カフ、エアース、バッテリー、フック、電源コードは消耗品ですので保証の対象外となります。

取扱い販売店

## A Group of HARADA CORPORATION

# 原田三誠メディカルサプライ株式会社

〒564-0032 大阪府吹田市本町3-26-29  
 TEL 06-6318-2318  
 FAX 06-6318-2317

技術で、人を想う。

## 日東工器株式会社

本社・研究所/メド事業部/リニア営業部  
 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4  
 Tel:03-5748-5521 Fax:03-3754-0258



医療機器  
WEBサイト

ホームページ [www.nitto-kohki.co.jp](http://www.nitto-kohki.co.jp)

●お客様相談窓口(土・日・祝日を除く)  
 受付時間 AM8:30~PM5:15  
 フリーコール **0120-210-216**



JQA-MD0148



JQA-2025

JQA-EM4057  
 本社/研究所

▲ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。  
 改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。